



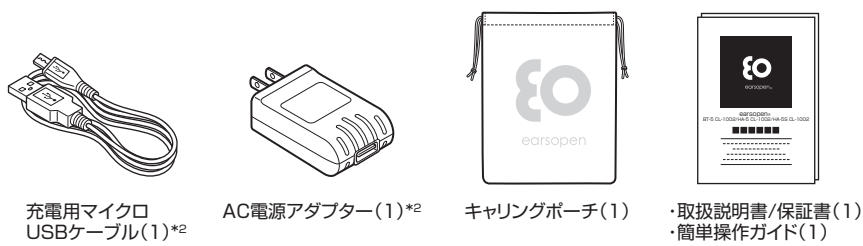

earsopen® HA-5 CL-1002 簡単操作ガイド


お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書と「取扱説明書」を
よくお読みの上、正しくお取り扱いください。
本書をお読みにになったあとは、
いつでも見られるところに必ず保管してください。

箱の中身を確認する

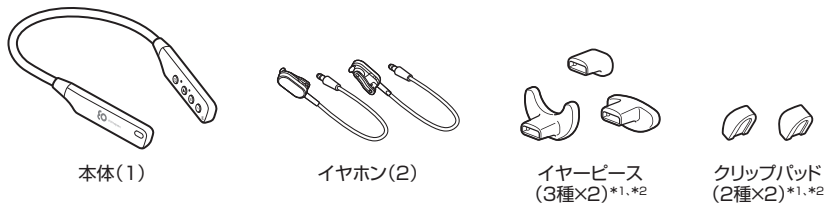

*1 1種類はイヤホンに装着済みです。
*2 キャリングポーチの中に入っています。

各部の名称

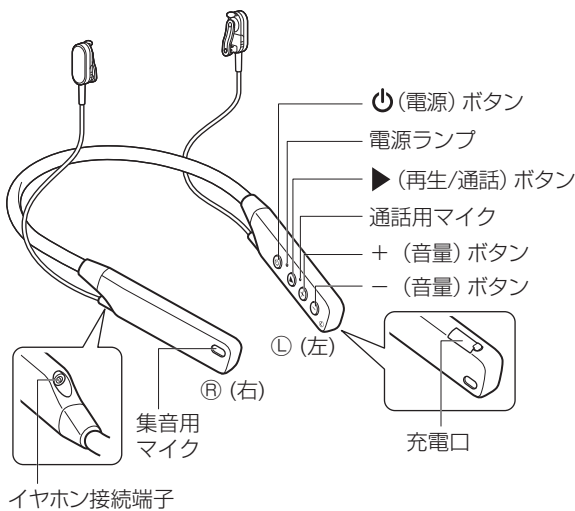

電源(青)ランプの状態

【点灯】電源オン/Bluetooth®
接続完了
【遅い点滅】Bluetooth接続待ち
【早い点滅】ペアリング(機器登録)
待ち
【消灯】電源オフ

電源(赤)ランプの状態

【点灯】充電中
【点滅】バッテリー残量低下
【消灯】充電完了

操作音／音声ガイダンスについて


以下のとき、操作音、または英語の音声ガイダンスが流れます。

- ・電源を入れたとき:「ピッピッ」
- ・電源を切ったとき:「ピー」
- ・電池の残量が低下したとき:「Battery low」(繰り返し流れます)
- ・本機音量ボタンで音量を最大にしたとき:「ビビビ」
- ・本機音量ボタンで音量を最小にしたとき:「ビビビ」
- ・ペアリングモードにしたとき:「Ready to pair」
- ・ペアリングが成功したとき:「Pairing completed」
- ・ペアリングが失敗したとき:「Pairing not completed」
- ・Bluetooth機器接続したとき:「Device connected」
- ・Bluetooth機器接続が切断したとき:「Device disconnected」
- ・電話が着信したとき:「Incoming call」
- ・通話を拒否したとき:「Call rejected」

充電する

はじめて本機を使用する場合は、まず充電してください。

- ① 本機の充電口のふたを開け、充電端子に付属のマイクロUSBケーブル(端子小)をつなぐ。
- ② AC電源アダプターとマイクロUSBケーブル(端子大)をつなぐ。
- ③ コンセントに接続し充電する。

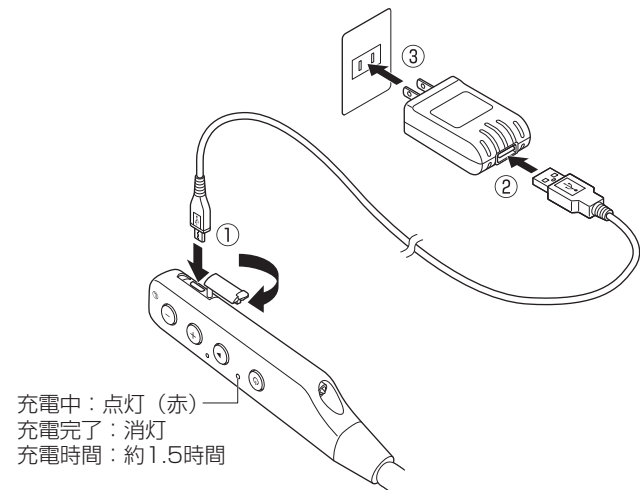


充電中:点灯(赤)
充電完了:消灯
充電時間:約1.5時間

【ご注意】

・充電完了後はマイクロUSBケーブルを外し、充電口のふたを閉めて、
水やほこりが入らないようにしてください。

イヤホンの本機に取り付ける

イヤホンのR(右)を本体のR(右)に、イヤホンのL(左)を本体のL(左)
に取り付ける。

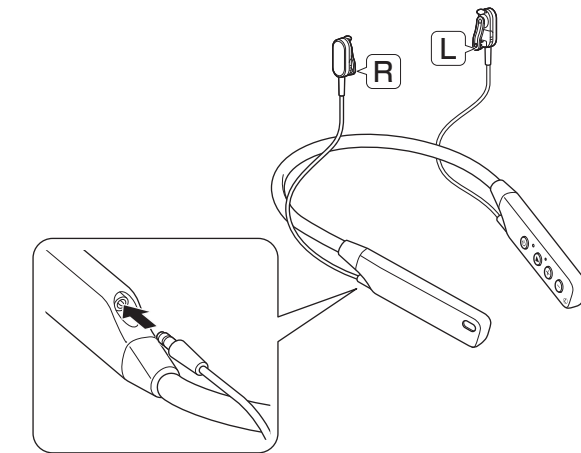

【ご注意】


・イヤホンの取り付け、取り外しは、本機の電源が切れている状態で行ってください。

Bluetooth接続する

はじめてペアリング(機器登録)する

はじめて本機をスマートフォンなどのBluetooth機器と接続するときや、新しいBluetooth
機器と接続するときはペアリング(機器登録)を行います。



- ① 本機の電源が切れている状態で(電源ランプ消灯)
⏻(電源)ボタンを3秒以上押す。

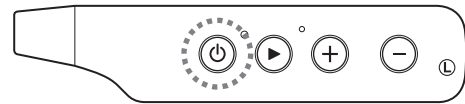

青ランプが速く点滅し、「ピッピッ」という音の後に「Ready to pair」
と音声ガイダンスが流れ、本機はペアリングモードになります。

- ② スマートフォンやパソコン、Bluetoothオーディオ送信機などを
操作し、本機を登録してBluetooth接続する。

下記の操作は一例です。詳しくはお使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

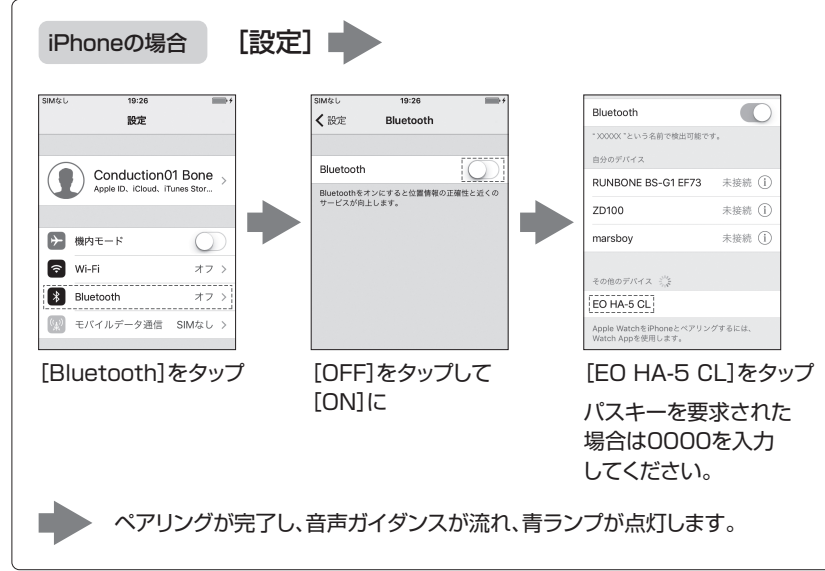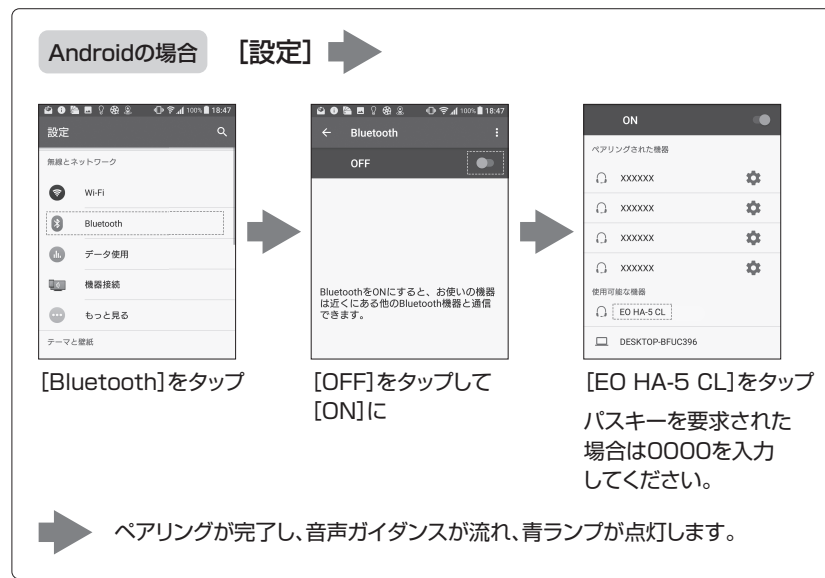

パソコンの場合

本機はBluetooth機能があるパソコンと接続することもできます。接続について詳しくは、
パソコンの取扱説明書をご覧ください。ペアリングが完了すると、青ランプが点灯
します。

【ポイント】

・本機は、最大8台のBluetooth機器をペアリングすることができます。


ペアリング済みの機器と接続する

- ・一度ペアリングを行うと、本機は接続機器の情報を記憶します。
- ・次回以降ペアリング済みの機器のBluetoothを有効(オン)にし、本機
の電源を入れると自動でBluetooth接続します。
- ・機器によっては自動で接続されない場合があります。


本機を装着する

ネックバンドの装着


本体を肩に載せ、左の肩に操作ボタンやランプがくるように装着する。

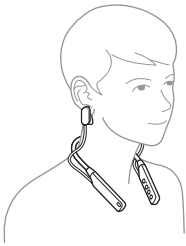


クリップの装着

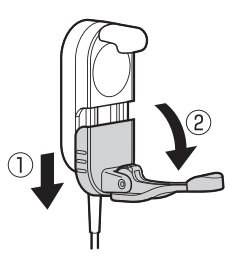

耳たぶの大きさに合わせてスライドさせ(①)、クリップを大きく開く(②)。

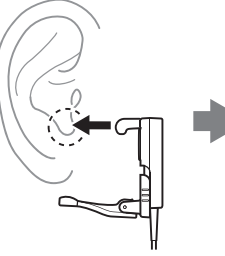


耳の穴手前に引っ掛け、耳の軟骨に押し当てる。

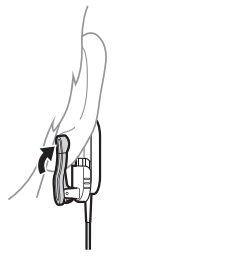

耳たぶを耳裏側のクリップではさみ、しっかり留まる位置に調整する。

ポイント

しっかり装着できない場合は、イヤークリップパッドを付属のものと交換してください。

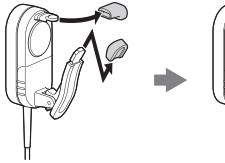

または

会話機能を使う

- ① **電源**ボタンを約1秒押して電源を入れる。「ピッピッ」という操作音が流れます。
- ② 本機の+/-ボタンを押して、音量を調整する。
- ③ 本機の電源が入っている状態で**電源**ボタンを約2秒押して電源を切る。「ピー」という操作音が流れます。




本機で音楽を聞いているときや通話しているときは、会話機能は使えません。会話機能を使うには、Bluetooth接続を切断するか、接続機器の音楽再生や通話接続を停止してください。数秒後に会話機能が有効になります。(接続状況によっては、数十秒かかることがあります。)

【ご注意】

集音用マイクにイヤホンを近づけ過ぎると、「キーン」という音(ハウリング)が発生することがあります。その場合は、イヤホンを集音用マイクから離すか、音量を下げてください。

音楽を聞く

- ① **Bluetooth**接続する。
おもて面の「Bluetooth接続する」をご覧ください。
- ② **スマートフォンの音楽再生アプリ**を起動する。
- ③ 本機の **▶**ボタン、またはスマートフォンの **▶**ボタンを押す。
- ④ 本機の+/- (音量)ボタン、または音楽再生アプリの音量ボタンを押して音量を調整する。

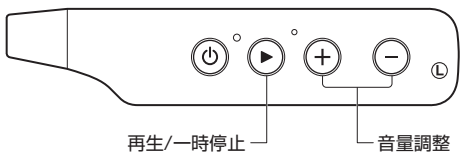

- ・スマートフォンによって動作が異なる場合があります。
- ・③で再生が始まらない場合は、本機の+ (音量)ボタンを最大にしてから、Bluetooth (音楽再生)接続機器で、音量や再生/一時停止の操作をしてください。本機の+/- (音量)ボタンと **▶** (再生/一時停止)ボタンが、Bluetooth (音楽再生)接続機器と連動しないことがあります。
- ・その他の機器で再生する場合は、お使いになる機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビなどの音を聞く

※市販のBluetoothオーディオ送信機が必要です。下記の操作はテレビの一例です。

- ① **テレビの電源**を入れ、**テレビの音量**を最小にする。
- ② **Bluetoothオーディオ送信機とテレビを接続**する。
詳しくは、Bluetoothオーディオ送信機の取扱説明書をご覧ください。
- ③ **Bluetooth**接続する。
詳しくは、おもて面の「Bluetooth接続する」をご覧ください。

【ご注意】

- ・スマートフォンとBluetooth接続しているときは、ペアリング設定できません。スマートフォンとのBluetooth接続を切断後にペアリングを行ってください。
- ・すべてのテレビには対応しておりません。

通話する


本機とペアリングしたスマートフォンなどでの通話を本機からも操作できます。
※おもて面の「Bluetooth接続する」をご覧ください。

電話をかける：スマートフォンなどから発信する。

電話を受ける：着信があったら、本機の **▶**ボタン、またはスマートフォンの **▶**を押す。

電話を切る：通話中に本機の **▶**ボタン、またはスマートフォンの **▶**を押す。

音量を調整する：本機の+/-ボタン、またはスマートフォンの音量ボタンを押す。

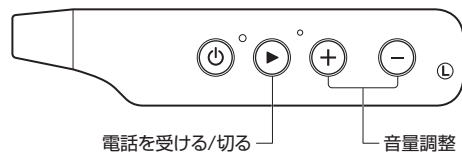

【ご注意】

- ・音楽を聞いているときに電話の着信があった場合は音楽が停止し、電話を切ると音楽再生が自動的に再開します。
- ・接続機器によっては、音楽再生が自動的に再開されない場合があります。
- ・スマートフォンやパソコンの一部の通話用アプリには対応していません。

バッテリーの残量を確認する

バッテリー残量はBluetooth接続しているiPhoneのバッテリー画面上で確認できます。一部のAndroid機器でご確認いただけない場合があります。
確認方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

初期化する

本機を初期化(リセット)することで動作が回復する場合があります。

- ① 本機の電源が切れていることを確認し、**電源**ボタンを10秒以上押す。



- ・「ピッピッ」、「Ready to pair」、「ピー」の音声ガイダンスが順番に流れます。
- ・電源ランプが消えるまで押し続けてください。

- ② スマートフォンなどBluetooth機器に残っている本機の情報削除する。
詳しくは、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

【ご注意】

- ・初期化すると、ペアリング(機器登録)情報が削除され、本機の音量がお買い上げ時の状態になります。

故障かなと思ったら

修理を依頼する前に、再度点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店またはbocoお客様相談窓口へご連絡ください。

症状	原因	対応
ペアリングできない。	本機から離れている。	接続する機器との距離を10m以内に近づけてください。再度ペアリングをしてください。
音が出ない、音が途切れる。	本機の電源が入っていない。	本機の電源を入れてください。
	接続機器とBluetooth接続されていない。	Bluetooth接続をしてください。
	本機から離れている。	接続する機器との距離を10m以内に近づけてください。再度ペアリングをしてください。
	接続先が不安定な状態になっている可能性がある。	接続する機器を確認し、再起動等をしてください。
	意図しない機器と接続してしまっている。	意図しない機器の電源を切ってください。
	接続機器との接続が切れている。	接続する機器を確認し、再接続してください。
	周囲の機器(電子レンジ、無線LAN機器、他のBluetooth機能搭載機器)などから電波干渉を受けている。	これらの機器の使用をやめるか、本機を電波干渉の少ない場所で使用してください。
	接続機器との間に障害物がある可能性がある。	障害物を取り除いてください。(例:別の部屋で接続を試みる)
	本機の音量が小さい。	本機の音量を上げてください。
音質が悪い。	電波状況が良くない。	接続する機器との距離を10m以内に近づけてください。再度ペアリングをしてください。
	音楽ファイル形式のサンプリング周波数が低い。	別の曲やアプリケーションを試してください。
	イヤホンが正しく装着されていない。	「本機を装着する」を確認してください。
通話ができない。	接続機器とペアリングできていない。	再度ペアリングをしてください。
	通話時の音声出力が本機に選択されていない。	接続している機器で、音声出力を本機にしてください。操作について詳しくは、接続機器の取扱説明書をご覧ください。
電源が入らない。	バッテリー残量が少ない。	本機を充電してください。
動作が不安定になる。	本機の動作が一時的に不安定になっている。	本機を初期化(出荷状態)してください。
充電できない。	マイクロUSBケーブルが本機とつながっていない。	本機とマイクロUSBケーブルを正しく接続してください。
異音がする。	音が大きすぎる。	音量を下げてください。

本機の仕様およびデザイン、本書の内容については改良のため予告なく変更する場合があります。
earsopen®の最新情報は、www.earsopen.jp をご覧ください。

商標について

- ・earsopen®、BONE AUDIO®は、BoCo株式会社の登録商標です。
- ・iPad、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ・Android®はGoogle Inc.の商標です。
- ・Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。